

TEST STREP-A - streptococco - cassetta conf. 20 pz.



TEST STREP-A - cassetta - conf. da 20 test Risultati accurati in pochi minuti. Utilizzo facile, indicazioni chiare e precise. La diagnosi immediata facilita la scelta rapida del trattamento. I reagenti rimangono stabili per tutta la durata di conservazione, anche dopo essere stati aperti. Sono inclusi: 20 cassette (pacco singolo), 2 reagenti, 20 provette e tamponi sterili, soluzione di controllo positività/negatività. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR, DE, SE, RO, SK) ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

Sensibilità relativa: 95,1% (89,6-98,2%) Accuratezza: 97,1% (95,3-98,4%) Specificità relativa: 97,8% (95,8-99%) PROCEDURA - aggiungere 4 gocce di reagente A, quindi le gocce del reagente B - ruotare 15 volte il tampone, attendere 1 minuto, quindi rimuovere il tampone comprimendo nel contempo la provetta per eliminare il liquido - posizionare la punta del contagocce all'estremità superiore della provetta - aggiungere 3 gocce di campione - leggere i risultati dopo 5 minuti