

CENTRIFUGA DIGITALE ZIP-IQ - 6 provette



CENTRIFUGA ZIP-IQ TT Centrifuga a 6 posti per centrifugare sangue, urina e altri fluidi in provette o microprovette da 0,5 a 15ml. Unità molto piccola e robusta. La velocità e il tempo possono essere regolati con controlli digitali. Il display visualizza la velocità e il tempo residuo. Il motore senza spazzole, che non richiede manutenzione, gira a 5.000 rpm (2.500 g), producendo siero in soli 5 min. L'urina è centrifugata a 2.000 rpm (400 g) in 5 min. Il freno automatico arresta il rotore in 10 sec. Apertura automatica del coperchio alla fine del ciclo.

VELOCITÀ E TEMPI CONSIGLIATI PER I VARI FLUIDI:

- Fluido: Sangue
- Provetta: Grande (6-15 ml)
- Inserti: nessuno o nero
- Velocità: 5.000 rpm
- Tempo: 5 minuti
- Fluido: Sangue
- Provetta: Piccola (3-5 ml)
- Inserti: bianco
- Velocità: 5.000 rpm

- Tempo: 6 minuti
 - Fluido: Sangue
 - Provetta: Microprovetta (0.5-2.0 ml)
 - Inserti: verde
 - Velocità: 5.000 rpm
 - Tempo: 7 minuti
 - Fluido: Urina
 - Provetta: Provette urina 10-15 ml
 - Inserti: nessuno
 - Velocità: 2.000 rpm
 - Tempo: 5 minuti
 - Fluido: Feci
 - Provetta: Provette feci 10-15 ml
 - Inserti: nessuno
 - Velocità: 1.700 rpm
 - Tempo: 6 minuti
-
- Intervallo velocità: 300-5,000 rpm (incrementi di 100)
 - RCF max: 2.500 g
 - Volume max: 6 provette da 15ml
 - Tensione ingresso: 100-240 V CA; 50-60 Hz
 - Tensione uscita: 24 V CC, 4 Amp dBA: 53 ± 3 dBA a 18-24"
 - Timer: 15 sec - 99 min
 - Dimensioni: 212x270xh 158 mm
 - Peso: 4,5 kg