

Defibtech Lifeline elettrodi adulto



Piastre defibrillatore Defibtech Lifeline

Queste piastre sono adatte per il Defibtech Lifeline E110 ed E100. Gli elettrodi possono essere riposti nella fessura nella parte posteriore del DAE, il cavo di connessione può essere subito collegato. Se non si attaccano le piastre nel defibrillatore, l'apparecchio dà un errore. La spina può essere inserita in un unico modo, per cui si esclude ogni margine d'errore ed è facile sostituire le placche da soli.

Se il vostro defibrillatore Defibtech Lifeline dà il codice errore 105, è facile risolvere la situazione. Bisogna tener premuto il bottone di accensione per circa 5 secondi, dopodiché il DAE eseguirà un'autodiagnosi e smetterà di dare errore.

Se l'errore persiste, mettetevi in contatto con noi al più presto.

Le piastre di ricambio si possono riporre nella borsa da trasporto disponibile in questo negozio.

Le placche per il Defibtech Lifeline sono monouso e hanno una durata di ca. 2 anni.

Attenzione! Non adatte per il Defibtech Lifeline View!

Pensate anche alla batteria al litio 9V con cui il Lifeline fa la sua autodiagnosi quotidiana? Questa batteria va sostituita annualmente e si può aggiungere facilmente al carrello cliccando sull'immagine nei prodotti correlati.

Specifiche

Adatto per modello Defibtech Lifeline AED/AUTO

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.1 kgs

Placche adulto per il defibrillatore Defibtech Lifeline semiautomatico e automatico.