

Elettrodi pediatrici Philips Heartstart HS1



Philips Heartstart HS1 elettrodi pediatrici

Si usano piastre pediatriche per la rianimazione di bambini con un'età inferiore agli 8 anni o con un peso minore di 25 kg. Gli elettrodi durano circa due anni. Quando si inserisce la cartuccia di elettrodi nel DAE, la quantità di Joule è ridotta automaticamente. Il posizionamento delle placche è indicato sia sulla cassetta sia sugli elettrodi stessi.

Durata degli elettrodi pediatrici HS1

La durata degli elettrodi pediatrici Philips Heartstart HS1 è di circa due anni, dopodiché il gel conduttore si deteriora piano piano al punto da non condurre più bene la scossa quando viene erogata, con possibili conseguenze negative per il paziente. Per questo motivo è importante verificare sempre la data di scadenza e tenere una cassetta di elettrodi pediatrici chiusa. La data di scadenza si trova sulla parte anteriore della cartuccia o sull'adesivo presente sulla pellicola che ricopre la stessa.

Caratteristiche ed uso degli elettrodi

Caratteristiche:

Autoadesive

Prive di lattice

Lunghezza cavo elettrodi: 137,1 cm

Conservazione a temperature tra i 10°C e 43°C (temperatura di stand-by)

Uso su bambini:

Per bambini con un'età inferiore agli 8 anni o con un peso minore di 25 kg si usano queste apposite placche pediatriche. Non appena si inserisce la cartuccia nel DAE, si abbassa la quantità di Joule ai 50 previsti per il protocollo pediatrico. Nella rianimazione pediatrica si applica un elettrodo sul dorso e un elettrodi sul torace del paziente.

Specifiche

Adatto per modello Philips Heartstart Home/HS1

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Bambini

Peso 0.3 kgs

Elettrodi pediatrici per il modello Philips Heartstart HS1.