

Elettrodi adulto Defibtech Lifeline View



Defibtech elettrodi per Lifeline View/ECG e Pro

Questi elettrodi (piastre) possono essere precollegati al defibrillatore Defibtech Lifeline View per risparmiare tempo al momento del bisogno. Sia sulla busta sia sulle placche stesse è indicato chiaramente come devono essere posizionate sul torace.

Data di scadenza degli elettrodi Defibtech Lifeline View/Pro/ECG

Le placche sono monouso e hanno una durata di circa 2 anni.

Elettrodi per la defibrillazione hanno uno strato di gel che conduce la scossa. Dopo un certo periodo di tempo questo gel si secca. Per questo motivo, tutti gli elettrodi hanno una data di scadenza dopo la quale non andrebbero più usate. La data di scadenza si ritrova sul retro della busta.

Collegare e conservare le piastre Defibtech Lifeline View

Le piastre possono essere tenute dentro ad una fessura apposita sul retro del DAE; il cavo invece va precollegato nella presa apposita. È facilissimo sostituire le piastre al bisogno e il

DAE dà errore se non trova le piastre precollegate. Eventuali coppie di scorta possono essere riposte dentro alla comoda borsa da trasporto.

Caratteristiche:

Pre-connesse

auto-adesive

Da conservare a temperature tra lo 0°C ed i 50°C

Prive di lattice

Defibrillazione pediatrica:

Per bambini d'età inferiore agli 8 anni e con un peso inferiore ai 25 kg, esistono piastre pediatriche apposite. Non appena si collegano gli elettrodi pediatrici, il defibrillatore passa al protocollo per bambini, riducendo la quantità di Joule erogate.

Specifiche

Adatto per modello Defibtech Lifeline View

Durata circa. 2 anni

Gruppo di pazienti Adulti

Peso 0.1 kgs

Defibtech pads adulti, piastre originali per il modello Lifeline View/Pro ed ECG.