

## ITALIANO

### FORBICI PER MATERIALI MEDICI

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

#### Dispositivi

Forbici per materiali medici (non sterili, in acciaio inossidabile).

#### Specifiche del prodotto

Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità specifico per la produzione di strumenti medicali, secondo le norme ISO e ASTM .

#### Pulizia preliminare

Rimuovere i depositi grossolani usando una spugna per laparotomia e acqua sterile durante la procedura.

#### Pulizia manuale

Per ridurre al minimo il rischio per il personale che esegue la pulizia manuale, gli spruzzi e la formazione di spruzzi devono essere evitati in ogni momento. Il personale che esegue la pulizia manuale deve indossare sempre i DPI necessari.

##### I dispositivi devono essere:

- 1) Puliti usando prima un panno privo di pelucchi impregnato con la soluzione detergente appropriata e, successivamente, con un panno pulito, umido e privo di pelucchi; poi
- 2) Asciugati con un altro panno pulito e privo di pelucchi. Infine, utilizzare salviette disinfettanti imbevute di alcol al termine del processo di pulizia manuale.

**Detergenti:** Utilizzare detergenti specifici: non utilizzare un comune detersivo per i piatti.

#### Disinfezione

Gli strumenti GIMA verniciati a polvere/di carta non sono autoclavabili, ma possono essere puliti/disinfettati con disinfettanti del tipo Endo Star (disinfettante per strumenti di alto livello) o con qualsiasi altra soluzione disinfettante/sterilizzante di efficacia superiore.

#### Istruzioni per un uso corretto

Possono essere utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati progettati e solo da personale adeguatamente qualificato.

#### Stoccaggio e manutenzione

I prodotti devono essere conservati lontano dalla luce diretta del sole e dall'acqua, in un ambiente sicuro, asciutto e fresco.

#### Avvertenze













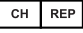

Non utilizzare lo strumento se è arrugginito. Lavare le mani con sapone antibatterico o usare un disinfettante per le mani approvato prima dell'uso.  
Solo per uso professionale - disinfettare prima dell'uso.

#### Conclusione

Questo dispositivo medico è classificato come prodotto di Classe I secondo il Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR) 2017/745.

#### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>DE</b> Erzeugniscode <b>ES</b> Código producto <b>PT</b> Código produto		<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante <b>DE</b> Hersteller <b>PT</b> Fabricante		<b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile <b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril <b>PT</b> Não estéril <b>DE</b> Nicht steril		<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>DE</b> Medizinprodukt <b>ES</b> Producto sanitario <b>PT</b> Dispositivo médico
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso <b>PT</b> Consulte as instruções de uso <b>DE</b> Gebrauchsanweisung beachten		<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación <b>PT</b> Data de fabrico <b>DE</b> Herstellungsdatum		<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote <b>PT</b> Número de lote <b>DE</b> Chargennummer		<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco <b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco <b>DE</b> An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>DE</b> Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				<b>IT</b> - Rappresentante autorizzato nel Regno Unito <b>GB</b> - Authorized Representative in the UK <b>FR</b> - Représentant autorisé au Royaume-Uni <b>ES</b> - Representante autorizado en el Reino Unido <b>PT</b> - Representante autorizado no Reino Unido <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich		<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar <b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar <b>DE</b> Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	<b>IT</b> - Identificatore univoco del dispositivo <b>GB</b> - Unique device identifier <b>PT</b> - Identificador exclusivo do dispositivo <b>FR</b> - Identifiant unique de l'appareil <b>DE</b> - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) <b>ES</b> - Identificador de dispositivo único				<b>IT</b> - Rappresentante autorizzato in Svizzera <b>GB</b> - Authorized Representative in Swiss <b>FR</b> - Représentant autorisé au Suisse <b>ES</b> - Representante autorizado en Suíço <b>PT</b> - Representante autorizado no Suíço <b>DE</b> - Autorisierter Vertreter im Schweizer		<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente <b>PT</b> Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente <b>DE</b> Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen



20520 - 20521 - 20522 - 20529  
20531 - 20532 - 20533 - 20534