

ISTRUZIONI PER L'USO

FLY/SAFE

AGHI EPICRANICI DI SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO:

Ago epicranico di sicurezza monouso, sterile, atossico, apirogeno, per il prelievo di sangue o per venipuntura.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire la confezione ed usare immediatamente. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona. Estrarre l'ago dalla confezione sterile. Sfilare il copri-ago. Evitare di toccare l'ago. Procedere con l'utilizzo. Al termine del processo, posizionare i polpastrelli in corrispondenza delle zigrinature e far scorrere in avanti il dispositivo di sicurezza, fino ad avvertire un "click" che rappresenta il blocco irreversibile dell'ago all'interno della protezione. Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

FTALATI:

Il dispositivo è DEHP free.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

FABBRICANTE:

RAYS SPA
VIA FRANCESCO CRISPI
60027 OSIMO (AN) – IT

Certificato CE: Certificato CE n. IT268973 emesso da Organismo notificato n.

1370 – Bureau Veritas Italia Spa – rilasciato
a RAYS S.p.A. con validità fino al
13/12/2022 in conformità ai requisiti della
Direttiva CEE 93/42 allegato V.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.

Ed. 3 – Ottobre 2020



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it