




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MISURATORE A NASTRO BODY TAPE MEASURE MESURE DU CORPS PAR RUBAN CINTA MÉTRICA DEL CUERPO FITA MÉTRICA CORPORAL MEZOYPA ΣΩΜΑΤΟΣ

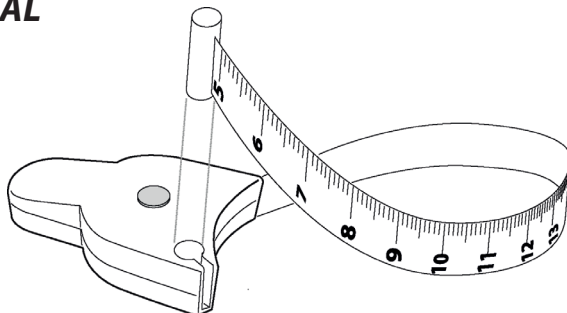

ITALIANO

Il misuratore a nastro è uno strumento per la misurazione della circonferenza fino ad un massimo di 152 cm.

Può essere utilizzato su ogni parte del corpo di forma circolare (addome, bicipiti, ecc.).

Non tirare con violenza; poiché la molla o il nastro potrebbero rompersi o deformarsi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tirare lentamente il nastro e avvolgerlo, senza attorcigliarlo, alla parte del corpo da misurare; premere il pulsante per facilitare il rilascio del nastro.

Inserire il terminale del nastro nell'apposita sede (foro rotondo) rispettando l'orientamento e premere il pulsante per riavvolgere il nastro fino a che sia ben teso.

Leggere la misura in corrispondenza della fessura di uscita del nastro.

Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato che non intacchi o rovini il nastro e la stampa.

Riavvolgere sempre il nastro al termine dell'uso.

Le misure si intendono puramente indicative.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA 27343

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/
Fabricante/Fabricante/Κατασκευαστής

YUYAO BOLI MEASURING TOOL FACTORY

No.18 ,Tangjiazha Road,Macaotou Village,Mazhu Town,Yuyao City
315400 Ningbo,Zhejiang Province,China
771216136@qq.com

REF TM008

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado de / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
Made in China

