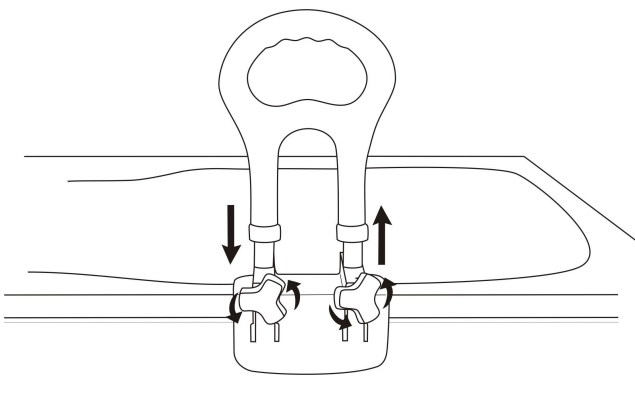
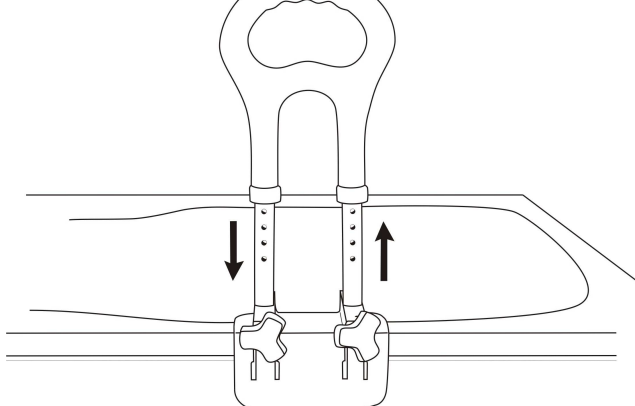


COD. 27734 MANIGLIA VASCA REGOLABILE IN ALTEZZA

⚠ ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto.

- ▲ Controllare che la maniglia regolabile in altezza per vasca sia fissata saldamente prima dell'uso.
- ▲ **NON** spingere o tirare la maniglia lateralmente. Questo movimento potrebbe allentare la barra dalla vasca e causare rischi all'incolumità dell'utente.
- ▲ Rispettare la portata massima indicata.
- ▲ La portata massima è pari a 110 kg.

FISSAGGIO / MODO D'USO:

	
<p>1. Allentare il dispositivo di fissaggio. Posizionare perpendicolarmente la maniglia alla parete della vasca e bloccare il dispositivo di fissaggio.</p>	<p>2. Regolare la maniglia all'altezza desiderata per ottenere una migliore presa.</p>