
BASTONE ALLUMINIO REGOLABILE

ADJUSTABLE ALUMINIUM WALKING STICK

Manuale d'uso - User manual

INTRODUZIONE

Questo bastone, può essere regolato in altezza. Prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La punta è ricoperta da una gomma antiscivolo. Altezza Regolabile REF.27780 (da 71 a 94 cm) REF.27781 (da 67 a 90 cm) REF.27784 (da 77 a 100 cm): la lunghezza va regolata in base all'altezza dell'utente.

NORME DI SICUREZZA

Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per regolare l'apparecchio e per imparare ad usarlo in modo adeguato.

Non conservare all'esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari. Prima dell'utilizzo verificare se tutti i collegamenti sono serrati correttamente.

Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.

Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio.) né sulle scale.

Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.

Osservare sempre i limiti di peso indicati sull'etichetta o nelle istruzioni.

Usare solo parti originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso di lungo inutilizzo, far controllare l'apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.

Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l'usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

INSTALLAZIONE

La messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato, un'errata regolazione potrebbe comportare un rischio di incidente.

Regolazione dell'altezza: allentare l'anello di serraggio. Premere il pulsante e far scivolare il tubo fino al foro di regolazione desiderato.

Far tornare il pulsante tornare in posizione di partenza. Avvitare l'anello di serraggio.

Per piegarlo, sganciare i tubi tra loro.








MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto. L'impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi). Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

GARANZIA

1 anno.

Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del prodotto.

Simboli - Symbols				
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42/CE Product complies with European Directive 93/42/CE		Codice prodotto Product code	 Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place
	Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso Read instructions carefully		Fabbricante Manufacturer	
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso Please read instructions carefully		Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight	

REF 27780 / 27781 / 27784



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in China (P.R.C.)

