

GYNOlight

Grazie per avere acquistato GynoLight. La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni e di tenerle a portata di mano. Questo prodotto usa 2 batterie AA da 1,5 V. Prima di usare GynoLight è necessario inserire le batterie.

Il supporto luminoso GynoLight per speculum monouso è progettato per essere compatibile con il 90% dei modelli attualmente utilizzati.

GynoLight consente l'indagine visiva della cervice, senza alcun contatto con la paziente, attraverso il fascio luminoso convergente emesso da due punti luce.

Specifiche

- Batterie 2 x AA 1,5 V
- Lampade: 2 x 24V DC / 250mAh tipo E5
- Interruttore


Utilizzo

- Accendere GynoLight
- Spostare la luce superiore per illuminare meglio

Sostituzione batterie

- Spingere lo sportello verso il basso per aprirlo
- Sostituire le vecchie batterie con due nuove AA 1,5 V.
- Richiudere lo sportello

ATTENZIONE: Non usare batterie ricaricabili da 1,2 Volt.

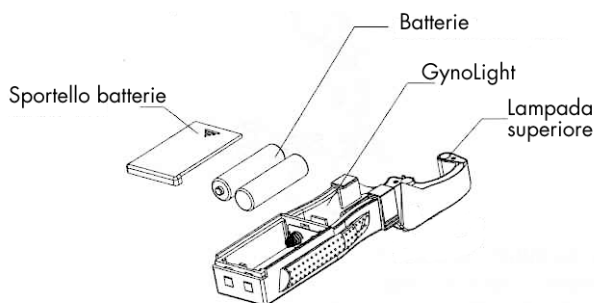

Manutenzione

- NON immergere in acqua o altri liquidi
- Per pulire usare un panno senza solventi
- Per rimuovere macchie usare un cotton fioc con poco alcool

