



Break the inside water bubble, by squeezing the bag with both hands.
 Premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna.
 Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains.
 Presionar con las dos manos hacia el centro hasta obtener la rotura de la burbuja interna.



Then shake it in order to mix the contents.
 Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto.
 Insulte agiter le sachet pour mélanger le contenu.
 Agitar la bolsa para mezclar el contenido.



Apply on the interested part.
 Applicare sulla parte interessata.
 Appliquer sur la partie intéressée.
 Aplicar sobre la parte interesada.

ISTRUZIONI: premere con entrambe le mani verso il centro fino ad ottenere la rottura della bolla interna. Agitare il sacchetto per miscelare il contenuto. Applicare sulla parte interessata.
INDICAZIONI D'USO: ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi in cui necessiti la crioterapia e l'uso del freddo.
ATTENZIONE: è un prodotto esclusivamente per uso esterno, monouso. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia ed è nocivo se ingerito.
 Se ciò avvenisse ricorrere subito all'intervento medico. Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non applicare su cute lesa. In caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud) utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato il medico. Nel caso di utilizzo su neonati, bambini ed anziani, consultare il medico prima del trattamento. In caso di dubbio sul trattamento da effettuare e se la sintomatologia persiste consultare il medico. **CONTENUTO:** miscela di sali azotati (conforme ai requisiti del Reg. CE 1907/2006 e s.m.l.) e acqua.



Instant cold compress Ghiaccio istantaneo in busta PE

- Pochette de froid instantané
- Hielo instantáneo (frío)
- Sofort-Kälte-Kompress (Kalt)
- Gêlo instantâneo (frio)
- Στιγμιαίος πάγος (κρύος)
- تلج فوري (بارد)

REF 34111 14x18 cm - PE bag



Fabbricante/Manufacturer:
 Gima S.p.A - Via Marconi, 1
 20060 Gessate (MI) - Italy
 Made in Italy



CE 0476



GIMA
www.gimaitaly.com

S09146 - Rev. 2 - 04/16 Size 14x18 cm