




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO - 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO EM AÇO - 7 PEÇAS

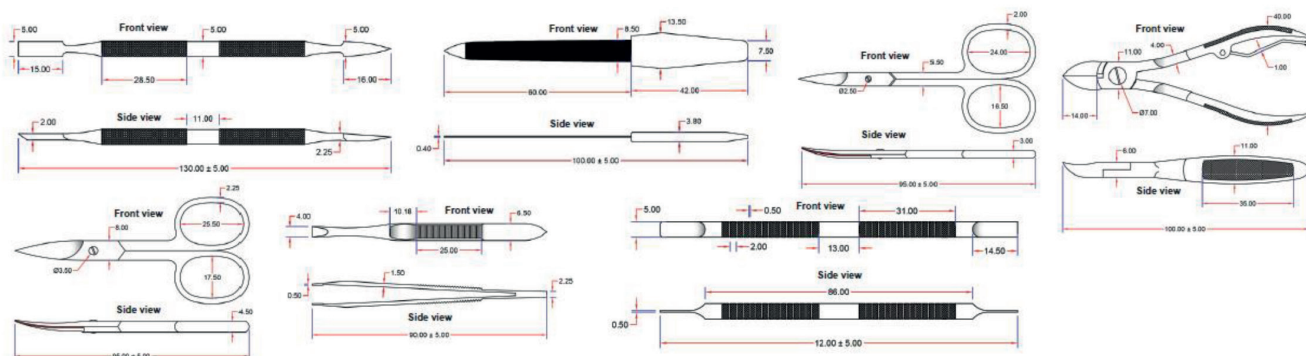

ITALIANO

Descrizione dei dispositivi

Nome: Spingi cuticole e pulitore, 13 cm

Nome: Lima per unghie con manico in plastica colorato, 10 cm

Nome: Tronchese per unghie, 9,5 cm

Nome: Tronchese per unghie, 10 cm

Nome: Forbici per unghie, 9,5 cm

Nome: Pinzette, 9 cm

Nome: Spingi cuticole doppio, 12 cm

Indicazioni d'uso



- Tenere lontano dalla portata di persone non sorvegliate.
- I dispositivi devono essere usati da una persona competente.
- Solo per uso professionale - disinfettare prima dell'uso.

Precauzioni, limitazioni, avvertenze, cure particolari

Metodi per una corretta pulizia

Una pulizia corretta l'uso di sapone liquido/detergente, acqua e l'uso di una spazzola pulita e disinfettata, da usare per rimuovere tutti i depositi e residui visibili.

Tutti gli articoli dovranno essere strofinati con una spazzola pulita e disinfettata sotto un getto di acqua corrente.

La pulizia non è la disinfezione: la disinfezione è un passaggio del tutto a sé. Per articoli diversi si usano metodi di pulizia diversi. Spesso questo dipende dal materiale con cui l'articolo è realizzato e da come l'articolo è stato usato.

NOTA: la pulizia è un passaggio da effettuarsi accuratamente prima di poter procedere alla disinfezione dell'articolo.

Tutti gli articoli devono essere sciacquati accuratamente e asciugati con un panno in tessuto pulito o di carta, prima di essere immersi in un disinfettante.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

IT - Indice dei simboli GB - Symbol index FR - Index des symboles
ES - Índice de símbolos PT - índice de símbolo DE - Symbolindex

	IT Codice prodotto GB Product code PT Código produto FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use PT Consulte as instruções de uso FR Consulter les instructions d'utilisation DE Gebrauchsanweisung beachten ES Consultar las instrucciones de uso
	IT Non sterile GB Non-sterile PT Não estéril FR Pas stérile DE Nicht steril ES No estéril
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place PT Armazenar em local fresco e seco FR À conserver dans un endroit frais et sec DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern ES Conservar en un lugar fresco y seco
	IT Numero di lotto GB Lot number PT Número de lote FR Numéro de lot DE Chargennummer ES Número de lote

	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight PT Guardar ao abrigo da luz solar FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES Conservar al amparo de la luz solar
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture PT Data de fabrico FR Date de fabrication DE Herstellungsdatum ES Fecha de fabricación
	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community PT Representante autorizado na União Europeia FR Représentant autorisé dans la Communauté DE - Autorisierter Vertreter in der EG europäischenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea

GIMA 39805

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante /
Fabricante / Hersteller:
Medistar Instruments Co., New Miana Pura East,
Ror as Road, Sialkot - Pakistan
Shams@medistarinst.com
Made in Pakistan

REF MI-78982

EC REP Lorcan & Fyon B.V.
Europalaan, 40, 3526KS Utrecht,
Netherlands

Importato da / Imported by / Importé par /
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

