

Manuale per l'uso: Lampada diagnostica LUX

REF LX200D ,LX210D ,LX210DW

I nostri prodotti si contraddistinguono per l'elevata qualità e la lunga durata. Questo prodotto RC soddisfa le disposizioni dell'Ordinanza europea sui dispositivi medici 2017/745 "EU-MDR".

Si prega di leggere attentamente e completamente le presenti istruzioni per l'uso prima dell'uso e di attenersi alle istruzioni per la cura. Prima dell'uso familiarizzare con il funzionamento.

Conservare le presenti istruzioni per l'uso futuro e consegnarle all'utilizzatore successivo dell'apparecchio.

Applicazione:

L'uso delle apparecchiature diagnostiche deve essere effettuato solo da personale autorizzato.

Scopo:

Le lampade fungono da ausilio per illuminare l'area da esaminare, come ad esempio la superficie della pelle.

Approvato per l'esame oculare (rivelso pupillare)

(prova di fotobiologico sicurezza secondo la norma DIN EN 62471:2009-03 per lampade e sistemi di illuminazione).

Utilizzo:

Rimuovere il fermo di trasporto rosso sulla clip. Accendere premendo la clip fino a quando non entra in contatto con l'anello metallico della lampada. Sostituire le batterie svitando il portalamпада in metallo. Inserire le batterie con il polo positivo rivolto verso il portalamпада.

Applicazione non appropriata / controindicazioni dei prodotti:

Una destinazione diversa da quella descritta non è considerata conforme alla destinazione.

Il produttore non è responsabile dei danni che ne derivano.



Avvertimento:

Non immergere mai le lampade nel liquido.

Non conservare in prossimità di elementi riscaldanti, non esporre alla luce solare diretta.

È riduce il tempo di vita delle batterie.

Si possono utilizzare solo lampadine di ricambio originali per evitare danni agli occhi.

In caso di danneggiamento visibile delle luci, queste devono essere rimosse dall'uso clinico.

Conservazione e trasporto dei prodotti:

Per evitare lo polvere e sporcizia le lampade vanno conservate sempre nella confezione.

Conservazione preferibilmente in luogo fresco (sotto i 30 °C) e asciutto, senza grandi variazioni di temperatura.

Attenzione: in caso di caduta pericolo di rottura della lampadina (solo articoli con lampadina)

Pulizia:

Le lampade vanno pulite con un panno umido sulla superficie.

Disinfezione per strofinamento:

La disinfezione delle lampade può essere effettuata con un panno sulla superficie inumidito con alcool.

Utilizzare salviettine detergenti a base di alcol certificate DGHM

Procedere al ritrattamento:

Raccomanda di procedere al ritrattamento delle luci possibilmente dopo l'uso.

Sterilizzazione:

La sterilizzazione non è possibile.

Prova di verifica e di funzionamento:

Controllare visivamente la lampada prima dell'uso. Prova la luminosità. Sostituire le batterie se necessario.

Eventi speciali:

Si prega di segnalare tutti gli incidenti gravi che si sono verificati in relazione al prodotto al produttore o alla persona responsabile



Richard Cermak Minitaschenlampen, Maximilianstr. 16a, 75172 Pforzheim



Raccolta differenziata di articoli elettrici ed elettronici
Le batterie usate devono essere raccolte separatamente