




3M™ Littmann™ Master Cardiology

Stetofonendoscopio monofaccia a membrana fluttuante

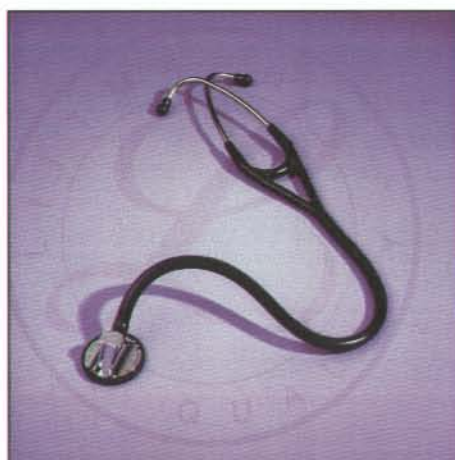

Codice Prodotto	Lunghezza (cm)/Peso(g)	Colore	Pezzi per scatola
2160	69/190	NERO	1
2163	69/190	BURGUNDY	1
2164	69/190	BLU NAVY	1
2165	69/190	VERDE FORESTA	1
2161	69/190	TOP BLACK	1

Dispositivo medico-Marcatura di conformità CE secondo D. Leg.vo 46/97 e successive modifiche attuativo della Dir. CEE 93/42-Classe I

Data: 20/05/2005

Edizione: 01

3M™ Littmann™ Master
Cardiology

Pag. 1 di 6

Copyright © 3M Italia S.p.A. – All rights reserved – Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.



Destinazione d'uso

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology è indicato per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico-diagnostico. Per esclusivo utilizzo professionale.

Caratteristiche tecniche

Lo stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology, rappresenta lo stetoscopio all'avanguardia nel campo dell'auscultazione, grazie alla sua esclusiva testina brevettata monofaccia che permette di auscultare selettivamente i suoni ad alta e bassa frequenza.

Lo stetoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology consente una rilevazione acustica ottimale con attenuazione di ogni possibile interferenza sonora.

Le principali caratteristiche sono:

- la rifinitura manuale dello strumento
- la testina in acciaio inossidabile con diaframma in fibra di vetro epossidica
- l'esclusivo "design due-tubi-in-uno", in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- la ghiera "anti-freddo" in neoprene
- le olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- l'archetto binauricolare leggero in alluminio con doppia molla interna per il miglior adattamento

Uno speciale adattatore, inoltre, permette un uso pediatrico dello strumento e facilita l'auscultazione in zone difficili.

Data: 20/05/2005	Edizione: 01	3M™ Littmann™ Master Cardiology	Pag. 2 di 6
------------------	--------------	---------------------------------	-------------

Copyright © 3M Italia S.p.A. - All rights reserved - Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.



La tecnologia “Master” permette di rilevare sia le basse che le alte frequenze, senza dover ruotare la testina.

Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione sulla testina.

Per la rilevazione delle alte frequenze, invece, è sufficiente esercitare una maggiore pressione.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale nè gomma naturale lavorata.

Sterilità

Lo stetoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology non è un prodotto sterile.

Confezionamento/Etichettatura

Ogni stetofonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology è confezionato in scatole di cartone.

L’etichettatura della confezione di vendita identifica inequivocabilmente il prodotto, la destinazione d’uso, il fabbricante, il mandatario europeo, il numero di lotto, in adempimento ai “requisiti essenziali” di cui all’allegato 1 (par. 13) del D. Leg.vo 46/97 e reca la simbologia convenzionale.

Data: 20/05/2005	Edizione: 01	3M™ Littmann™ Master Cardiology	Pag. 3 di 6
------------------	--------------	------------------------------------	-------------

Copyright © 3M Italia S.p.A. – All rights reserved – Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.



All'interno di ogni confezione è contenuto un libretto illustrativo multilingue con le istruzioni per l'uso anche in lingua italiana, che si raccomanda di leggere attentamente prima dell'uso.

Modalità di conservazione/Periodo di validità

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15 e i 30 °C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. . .

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Lo stetoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per sette anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

Modalità d'uso/Avvertenze/Precauzioni

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetoscopio 3M™ Littmann™ Master Cardiology può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Data: 20/05/2005	Edizione: 01	3M™ Littmann™ Master Cardiology	Pag. 4 di 6
------------------	--------------	------------------------------------	-------------

Copyright © 3M Italia S.p.A. - All rights reserved - Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.



Lo stetoscopio non va immerso in alcun liquido, nè sterilizzato a vapore. Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Aspetti ambientali

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari. Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Fabbricante

3M Health Care-St. Paul, Minnesota-U.S.A.

Assicurazione di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i “sistemi di qualità” per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

Data: 20/05/2005	Edizione: 01	3M™ Littmann™ Master Cardiology	Pag. 5 di 6
------------------	--------------	------------------------------------	-------------

Copyright © 3M Italia S.p.A. – All rights reserved – Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.



La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne , allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Data: 20/05/2005	Edizione: 01	3M™ Littmann™ Master Cardiology	Pag. 6 di 6
------------------	--------------	------------------------------------	-------------

Copyright © 3M Italia S.p.A. – All rights reserved – Tutti i diritti riservati

3M

Italia S.p.A.